

# Breeze Nasal Comfort

## Használati útmutató

1. verzió  
2022. február

Breeze Nasal Comfort: Hivatkozás: Méretek XS= M-268010-12 S= M-268020-12 M= M-268030-12 L= M-268040-12

Kérjük, a maszk használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

### JAVASOLT HASZNÁLAT

A Breeze Nasal Comfort maszkot folyamatos pozitív légúti nyomást (CPAP) vagy kétszintű nyomást (BiPAP) biztosító barometrikus készülékkel való orron keresztül történő lélegeztetésre tervezték. A Breeze Nasal Comfort maszkot azok a felnőtt betegek (>30 kg) használhatják:

- akiknek pozitív légúti nyomással történő kezelést írtak elő.
- akiket otthon vagy egészségügyi intézményben kezelnek.

### FIGYELMEZTETÉSEK

Ne zárja el és ne próbálja elzárni a légkimeneti nyílásokat.

- Ez a maszk csak orvos vagy tüdőgyógyász által ajánlott CPAP vagy BiPAP készülékkel használható.
- A maszk nem használható, ha a készüléket nem indították be és nem üzemszerűen működik.

**Magyarázat:** A CPAP és BiPAP készülékeket olyan speciális maszkokkal kell használni, amelyek a kilélegzett levegő folyamatos kibocsátását lehetővé tevő légkimeneti nyílásokkal rendelkeznek. Ha a készülék normálisan működik, a friss levegő a maszk légkimeneti nyílásain keresztül kitolja a készülékből a kilélegzett levegőt. Ha azonban a készülék nem működik, nem jut elég friss levegő a maszkba, és a kilélegzett levegő újra belélegezhetővé válik. A kilélegzett levegő néhány percnél hosszabb ideig történő belélegzése bizonyos körülmények között fulladáshoz vezethet. Ez a legtöbb CPAP vagy BiPAP készülékre vonatkozik.

- Ha a használat során bármilyen mellékhatást tapasztal (klausztrófia, irritáció, fájdalom, kötőhártya-gyulladás stb...), hagyja abba a maszk használatát.
- Ha ilyet érezne, forduljon a kezelőorvosához.
- A maszk használata fájdalmat okozhat az ínyben, a fogakban vagy az állkapocsban, illetve súlyosbíthatja a fogászati problémákat. Ha ilyet érezne, kérjük, forduljon fogorvoshoz.
- Ne használja a maszkot, ha a csomagolást felbontották vagy megsérült. Ha a maszk vagy az eszköz megsérül vagy eldeformálódik, cserélje ki azokat.
- Az első használat előtt tisztítsa meg a maszkot.
- Ne használja a maszkot, ha nem tudja azt segítség nélkül levenni.
- Ha oxigént kell alkalmazni, kövesse az oxigén használatával kapcsolatos utasításokat és biztonsági óvintézkedéseket.
- A szivárgás minimalizálása érdekében különböző méretű maszktestek és homloktámaszok állnak rendelkezésre. Érdeklődjön egészségügyi szolgáltatójánál.

### KARBANTARTÁS/TISZTÍTÁS

A maszkot naponta meg kell tisztítani az alábbi utasításoknak megfelelően:

- Válasszon le a maszkról minden más tartozékot (fejpánt, cső).
- Meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel (5 <math>pH</math> < 8), például szappannal vagy mosogatószerrel, mossa el a maszk különböző részeit.
- Öblítsen le minden alkatrészt tiszta vízzel.
- Mielőtt újra használná, hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon egy ruhaanyagon, tiszta, napfénytől védett helyen.
- Hetente egyszer kézzel mossa ki a fejpántot.

#### Megjegyzés:

- Ne használjon fehérítőt, alkoholt, alkoholtartalmú tisztítószereket, sampont vagy erősen illatosított termékeket.
- Ha a rendszer egy része láthatóan megrongálódott (törés, repedés, szakadás stb...), az alkatrészt ki kell cserélni.

### TÁROLÁS

Mielőtt elrakja a maszkot, mossa el és szárítsa meg.

A maszkot tiszta és száraz helyen, napfénytől védetten tárolja.

A környezet védelme érdekében a maszkot szemetesbe kell kidobni.


Ne dobja ki helytelenül.

Minőségét megőrzi: a gyártástól számított 5 évig.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kezelési nyomás:	3 - 20 cmH <sub>2</sub> O
Üzemi hőmérséklet:	5° C - +35° C
Tárolási hőmérséklet:	-20° C - +60° C

Nyomásesés-mérés: 50 l/percnél 0,2 cmH<sub>2</sub>O, míg 100 l/percnél 0,85 cmH<sub>2</sub>O  
 Zajsztint: 27,5 dBA - 10cmH<sub>2</sub>O  
 A beteggel érintkezésbe kerülő anyagok: szilikon, Oeko-Tex textil és SBR elasztomer

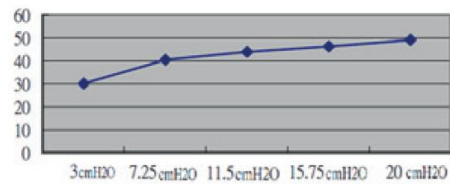

Nyomás-áramlási görbe:

3 cmH <sub>2</sub> O :	30,1 l/perc
7,25 cmH <sub>2</sub> O:	40,6 l/perc
11,5 cmH <sub>2</sub> O:	44,0 l/perc
15,75 cmH <sub>2</sub> O:	46,3 l/perc
20 cmH <sub>2</sub> O:	49,1 l/perc

#### A MASZK FELHELYEZÉSE

Az A1-es és A2-es tépőzárak kicsatolásával készítse elő a fejpántot.

Fűzze be az A1-es tépőzárát a B1-es kapocsba, majd zárja össze (3. és 4. ábra). Ismételje meg ezt az A2-es tépőzárral és a B2-es kapoccsal (5. és 6. ábra).

Helyezze a maszkot a fejére, és állítsa be a fejpánt szorosságát a fejtetőn. (7. ábra).

Csíptesse az A3-as pántvéget a váz B3-as kapcsába. Tegye ugyanezt az A4-es véggel és a B4-es kapoccsal (8. ábra).












Állítsa be az A1, A2, A3 és A4-es pántok szorosságát, hogy a fejpánt megfelelően helyezkedjen el (9. és 10. ábra).

Győződjön meg arról, hogy a fejpánt hátulja megfelelően szoros-e ahhoz, hogy a maszk ne csússzon el.

Mindennapos használat esetén egyszerűen csatolja az A3-as pántvéget a keret B3-as kapcsába, vagy az A4-es pántvéget a B4-es kapocsba (8. ábra), majd a kezelés végeztével csak ezeket csatolja ki.

#### A tartozékok listája:

1	Szilikon maszktest	6	Csatlakozási dugó
2	Belső váz	7	Fejpánt rögzítő csat
3	Külső váz	8	Adapter
4	Homloktámasz	9	Fejpánt
5	Könyök		

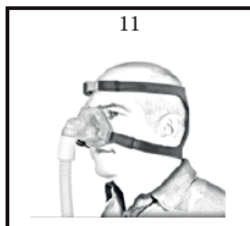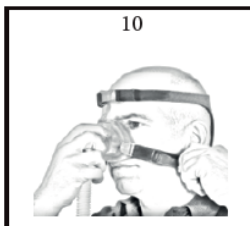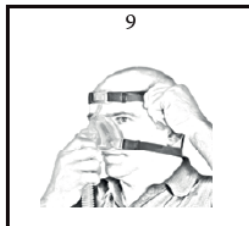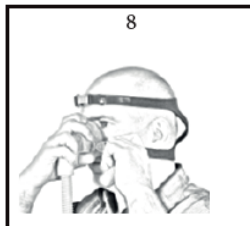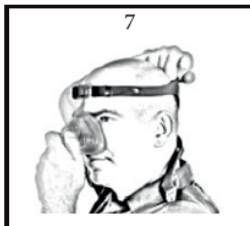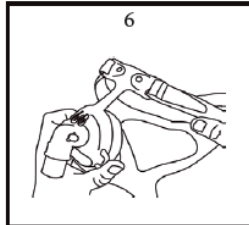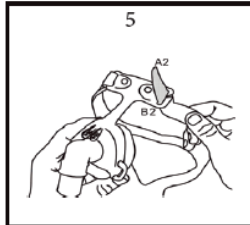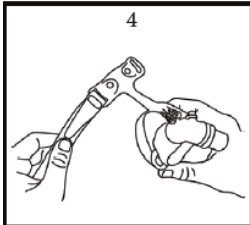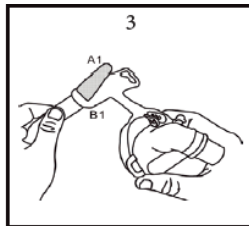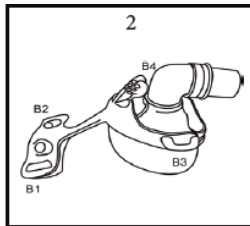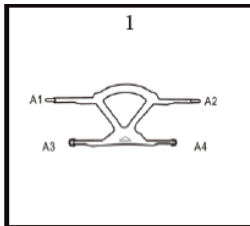

**Sefam**

**Breeze  
Nasal Comfort**

[www.sefam-medical.com](http://www.sefam-medical.com)

SEFAM-Customer Service  
10, allée Pelletier Doisy  
54600 Villers-lès-Nancy  
France

Tél : +33 383 44 85 00  
Fax : +33 383 44 85 01

Email :  
[customerservice@sefam-medical.com](mailto:customerservice@sefam-medical.com)

**CE** 2460

MADE IN TAIWAN

EC REP Mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str. 71  
30855 Langenhagen  
GERMANY

HSINER Co. Ltd.  
No 312, Jongshan Rd.  
Shengang Dist.  
Taichung City 429