

# Breeze Pillows maszk

## Használati útmutató

1. verzió  
2022. február

**Breeze Pillows maszk: Kereskedelmi hivatkozási szám: M-268090-30**

Kérjük, a maszk használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

### JAVASOLT HASZNÁLAT

A Breeze Pillows maszkot folyamatos pozitív légúti nyomást (CPAP) vagy kétszintű nyomást (BiPAP) biztosító barometrikus készülékkel való orron keresztül történő lélegeztetésre tervezték. A Breeze Pillows maszkot azok a felnőtt betegek (>30 kg) használhatják:

- akiknek pozitív légúti nyomással történő kezelést írtak elő.
- akiket otthon vagy egészségügyi intézményben kezelnek.

### FIGYELMEZTETÉSEK

Ne zárja el és ne próbálja elzárni a légkimeneti nyílásokat.

- Ez a maszk csak orvos vagy tüdőgyógyász által ajánlott CPAP vagy BiPAP készülékkel használható.
- A maszk nem használható, ha a készüléket nem indították be és nem üzemszerűen működik.

**Magyarázat:** A CPAP és BiPAP készülékeket olyan speciális maszkokkal kell használni, amelyek a kilélegzett levegő folyamatos kibocsátását lehetővé tevő légkimeneti nyílásokkal rendelkeznek. Ha a készülék normálisan működik, a friss levegő a maszk légkimeneti nyílásain keresztül kitalja a készülékből a kilélegzett levegőt. Ha azonban a készülék nem működik, nem jut elég friss levegő a maszkba, és a kilélegzett levegő újra belélegezhetővé válik. A kilélegzett levegő néhány percnél hosszabb ideig történő belélegzése bizonyos körülmények között fulladáshoz vezethet. Ez a legtöbb CPAP vagy BiPAP készülékre vonatkozik.

- Ha a használat során bármilyen mellékhatást tapasztal (klausztofóbia, irritáció, fájdalom, kötőhártya-gyulladás stb...), hagyja abba a maszk használatát. f érezne, forduljon a kezelőorvosához.
- Ne használja a maszkot, ha a csomagolást felbontották vagy megsérült. Ha a maszk vagy az eszköz megsérül vagy eldeformálódik, cserélje ki azokat.
- Az első használat előtt tisztítsa meg a maszkot.
- Ne használja a maszkot, ha nem tudja azt segítség nélkül levenni.
- Ha oxigént kell alkalmazni, kövesse az oxigén használatával kapcsolatos utasításokat és biztonsági óvintézkedéseket.

### KARBANTARTÁS/TISZTÍTÁS

A maszkot naponta meg kell tisztítani az alábbi utasításoknak megfelelően:

- Válasszon le a maszkról minden más tartozékot (fejpánt, cső).
- Meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel (5 <pH< 8), például szappannal vagy mosogatószerrel, mossa el a maszk különböző részeit.
- Öblítsen le minden alkatrészt tiszta vízzel.
- Mielőtt újra használná, hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon egy ruhaanyagon, tiszta, napfénytől védett helyen.
- Hetente egyszer kézzel mossa ki a fejpántot.

#### Megjegyzés:

- Ne használjon fehérítőt, alkoholt, alkoholtartalmú tisztítószereket, sampont vagy erősen illatosított termékeket.
- Ha a rendszer egy része láthatóan megrongálódott (törés, repedés, szakadás stb...), az alkatrészt ki kell cserélni.

### TÁROLÁS

Mielőtt elrakja a maszkot, mossa el és szárítsa meg.


A maszkot tiszta és száraz helyen, napfénytől védetten tárolja.

A környezet védelme érdekében a maszkot szemetesbe kell kidobni.

Ne dobja ki helytelenül. Minőségét megőrzi: a gyártástól számított 5 évig.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kezelési nyomás:	3 - 40 cmH <sub>2</sub> O
Üzemi hőmérséklet:	5° C - +35° C
Tárolási hőmérséklet:	-20°C - +60°C
Nyomásmérés:	50 l/percnél 2,1 cmH <sub>2</sub> O, míg 100 l/percnél 8 cmH <sub>2</sub> O
Zajsztint:	22,5 dBA - 10cmH <sub>2</sub> O-ig
A beteggel érintkezésbe kerülő anyagok:	szilikon, Oeko-Tex textil és SBR elasztomer

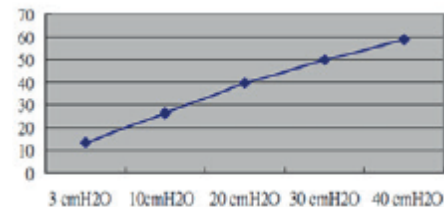

Nyomás-áramlási görbe:

3 cmH <sub>2</sub> O :	13,5 l/perc
10 cmH <sub>2</sub> O:	26,5 l/perc
20 cmH <sub>2</sub> O:	39,6 l/perc
30 cmH <sub>2</sub> O:	50,0 l/perc
40 cmH <sub>2</sub> O:	58,8 l/perc

#### A MASZK FELHELYEZÉSE

Készítse elő az orrpárnákat 1. ábra

Fűzze be az B1-es tépőzárát a A1-es kapocsba, majd zárja össze (2., 3. és 4. ábra).

Tegye ugyanezt az A1"-es és a B1"-es végekkel (5. ábra). Fűzze be az C1-es tépőzárát az A2-es kapocsba, majd zárja össze (6. ábra).

Tegye ugyanezt az C1-es és az A2-es pántvégekkel (7. ábra).

Helyezze a maszkot a fejére, és állítsa be a fejpánt szorosságát a fejtetőn. (8., 9. és 10. ábra)

Állítsa az orrbetéteket a megfelelő szögbe (10. ábra), és a maszk készen áll a használatra (11. ábra).


A fején átvetve szerelje fel a csövet (12. ábra).

Ha az orrbetétek nyomják az orrát, állítsa be a cső hosszát az orra és a felső pánt között (13. ábra).

Napi használat esetén a fejpánt rugalmassága lehetővé teszi a maszk levételét és felhelyezését újbóli beállítás nélkül.

#### A tartozékok listája:

1	Felső fejpánt	6	Csatlakozó gyűrű
2	Hátsó fejpánt	7	Szögben elfordítható csatlakozó
3	Orrbetét	8.	Szilikoncső
4	Orrbetéttartó	9.	Forgatható csatlakozó
5	Fő váz	10.	Csőcsatlakozó

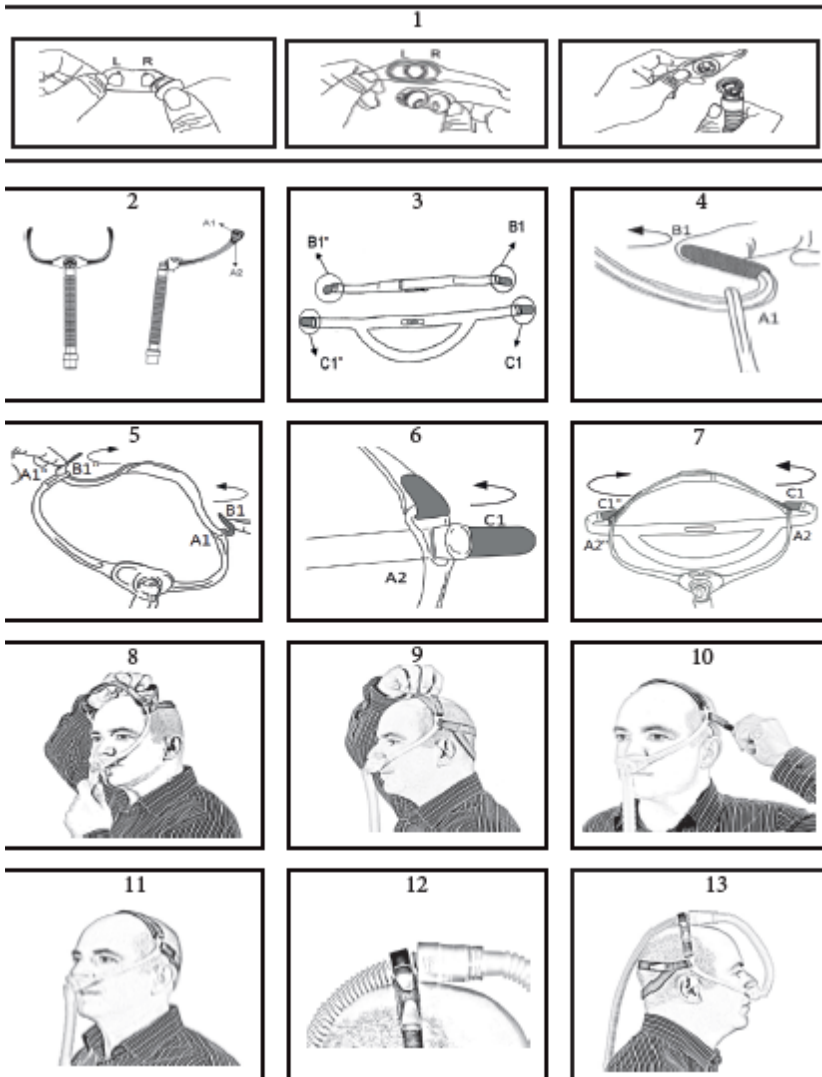

**Sefam**


**Breeze  
Pillows Mask**

[www.sefam-medical.com](http://www.sefam-medical.com)

SEFAM-Customer Service  
10, allée Pelletier Doisy  
54600 Villers-lès-Nancy  
France

Tél : +33 383 44 85 00  
Fax : +33 383 44 85 01

Email :  
[customerservice@sefam-medical.com](mailto:customerservice@sefam-medical.com)

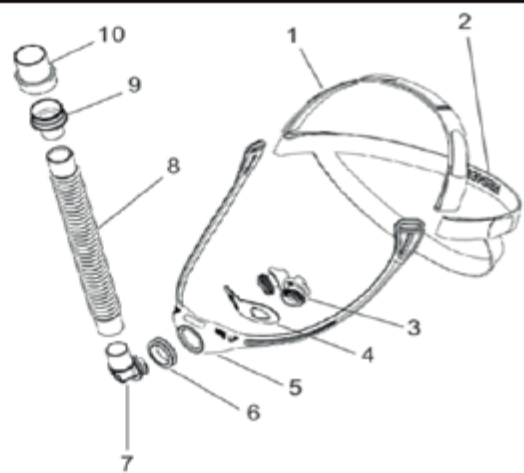

**CE** 2460

MADE IN TAIWAN

**MDI** Mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str. 71  
30855 Langenhagen  
GERMANY

**HSINER Co. Ltd.**  
No 312, Jongshan Rd.  
Shengang Dist.  
Taichung City 429