

Breeze Zen maszk

Használati útmutató

1. verzió
2022. február

Breeze Zen maszk: Hivatkozás: Méret S= M-268020-13 M= M-268030-13 L= M-268040-13

Kérjük, a maszk használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

JAVASOLT HASZNÁLAT

A Breeze Zen maszkot folyamatos pozitív légúti nyomást (CPAP) vagy kétszintű nyomást (BiPAP) biztosító barometrikus készülékkel való orron keresztül történő lélegeztetésre tervezték. A Breeze Zen maszkot azok a felnőtt betegek (>30 kg) használhatják:

- akiknek pozitív légúti nyomással történő kezelést írtak elő.
- akiket otthon vagy egészségügyi intézményben kezelnek.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne zárja el és ne próbálja elzárni a légkimeneti nyílásokat.

- Ez a maszk csak orvos vagy tüdőgyógyász által ajánlott CPAP vagy BiPAP készülékkel használható.
- A maszk nem használható, ha a készüléket nem indították be és nem üzemszerűen működik.

Magyarázat: A CPAP és BiPAP készülékeket olyan speciális maszkokkal kell használni, amelyek a kilélegzett levegő folyamatos kibocsátását lehetővé tevő légkimeneti nyílásokkal rendelkeznek. Ha a készülék normálisan működik, a friss levegő a maszk légkimeneti nyílásain keresztül kitalja a készülékből a kilélegzett levegőt. Ha azonban a készülék nem működik, nem jut elég friss levegő a maszkba, és a kilélegzett levegő újra belélegezhetővé válik. A kilélegzett levegő néhány percnél hosszabb ideig történő belélegzése bizonyos körülmények között fulladáshoz vezethet. Ez a legtöbb CPAP vagy BiPAP készülékre vonatkozik.

- Ha a használat során bármilyen mellékhatást tapasztal (klausztrófia, irritáció, fájdalom, kötőhártya-gyulladás stb...), hagyja abba a maszk használatát.
- Ha ilyet érezne, forduljon a kezelőorvosához.
- A maszk használata fájdalmat okozhat az ínyben, a fogakban vagy az állkapocsban, illetve súlyosbíthatja a fogászati problémákat. Ha ilyet érezne, kérjük, forduljon fogorvoshoz.
- Ne használja a maszkot, ha a csomagolást felbontották vagy megsérült. Ha a maszk vagy az eszköz megsérül vagy eldeformálódik, cserélje ki azokat.
- Az első használat előtt tisztítsa meg a maszkot.
- Ne használja a maszkot, ha nem tudja azt segítség nélkül levenni.
- Ha oxigént kell alkalmazni, kövesse az oxigén használatával kapcsolatos utasításokat és biztonsági óvintézkedéseket.
- A szivárgás minimalizálása érdekében különböző méretű maszktestek és homloktámaszok állnak rendelkezésre. Érdeklődjön egészségügyi szolgáltatójánál.

KARBANTARTÁS/TISZTÍTÁS

A maszkot naponta meg kell tisztítani az alábbi utasításoknak megfelelően:

- Válasszon le a maszkról minden más tartozékot (fejpánt, cső).
- Meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel (5 <pH < 8), például szappannal vagy mosogatószerrel, mossa el a maszk különböző részeit.
- Öblítsen le minden alkatrészt tiszta vízzel.
- Mielőtt újra használná, hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon egy ruhaanyagon, tiszta, napfénytől védett helyen.
- Hetente egyszer kézzel mossa ki a fejpántot.

Megjegyzés:

- Ne használjon fehérítőt, alkoholt, alkoholtartalmú tisztítószereket, sampont vagy erősen illatosított termékeket.
- Ha a rendszer egy része láthatóan megrongálódott (törés, repedés, szakadás stb...), az alkatrészt ki kell cserélni.

TÁROLÁS

Mielőtt elrakja a maszkot, mossa el és szárítsa meg.

A maszkot tiszta és száraz helyen, napfénytől védetten tárolja.


A környezet védelme érdekében a maszkot szemetesbe kell kidobni. Ne dobja ki helytelenül.

Minőségét megőrzi: a gyártástól számított 5 évig.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kezelési nyomás:	4 - 30 cmH ₂ O
Üzemi hőmérséklet:	+15° C - +25° C
Tárolási hőmérséklet:	+15°C - +25°C
Nyomásmérés:	50 l/percnél 0,28 cmH ₂ O, míg 100 l/percnél 1,09 cmH ₂ O

Zajsztint: 31,5 dBA - 10cmH₂O-ig
A beteggel érintkezésbe kerülő anyagok: szilikon, Oeko-Tex textil és SBR elasztomer

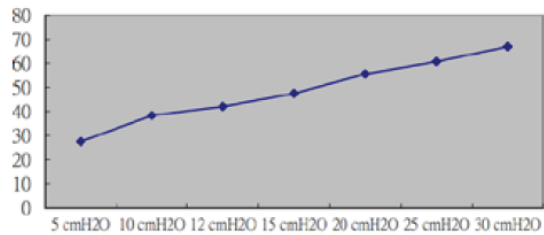

Nyomás-áramlási görbe:

5 cmH ₂ O :	28 l/perc
10 cmH ₂ O:	38 l/perc
12 cmH ₂ O:	42 l/perc
15 cmH ₂ O:	48 l/perc
20 cmH ₂ O:	56 l/perc
25 cmH ₂ O:	61 l/perc

A MASZK FELHELYEZÉSE

Készítse elő a fejpántot az A1-es és A2-es tépőzár kicsatolásával. (1. ábra)

Fűzze be az A1-es tépőzárát a B1-es kapocsba, majd zárja össze (3. és 4. ábra). Ismételje meg ezt az A2-es tépőzárral és a B2-es kapoccsal (5. és 6. ábra).

Helyezze a maszkot a fejére, és állítsa be a fejpánt felső pántjainak a szorosságát (4. ábra).








Csíptesse az A3 pántvéget a váz B3-as kapcsához. Ismételje meg ezt az A4-es pántvéggel és a B4-es kapoccsal (5., 6. ábra).


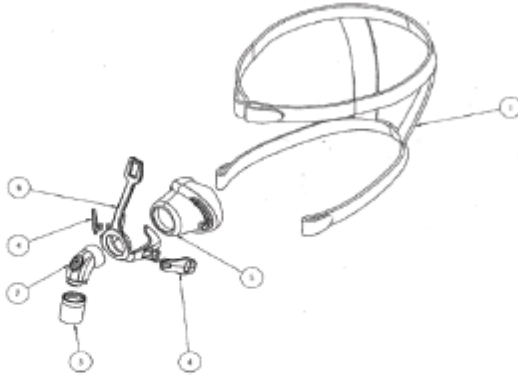

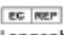

Győződjön meg arról, hogy a fejpánt hátulja megfelelően szoros-e ahhoz, hogy a maszk ne csússzon el.

Mindennapos használat esetén egyszerűen csatolja az A3-as pántvéget a keret B3-as kapcsába, vagy az A4-es pántvéget a B4-es kapocsba (5. ábra), majd a kezelés végeztével csak ezeket csatolja ki.

A tartozékok listája:

1	Fejpánt	5	Szilikon maszktest
2	Könyök	8	Orrpárnatartó váz
3	Adapter		
4	Fejpánt rögzítő csat		

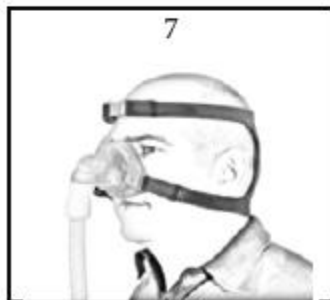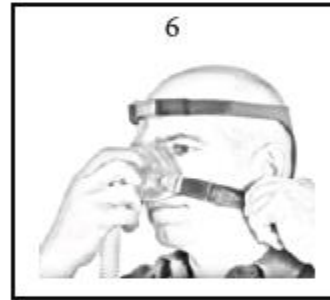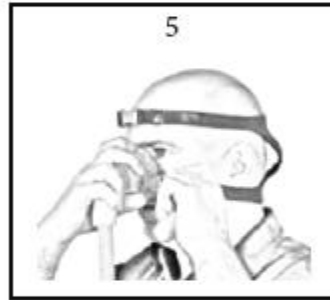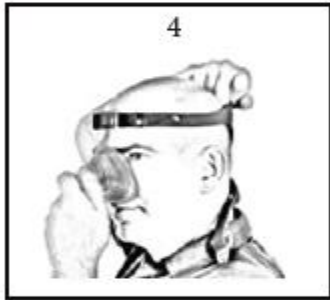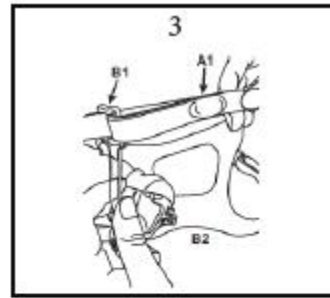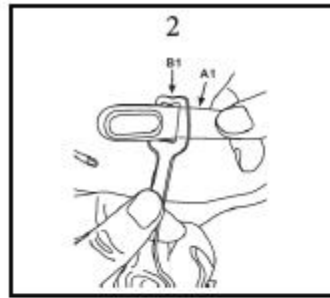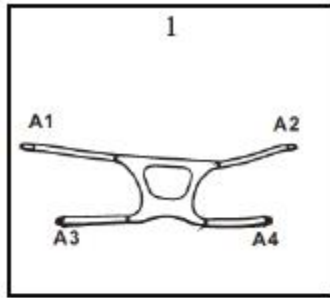

 <p>Breeze Zen Mask</p> <p>www.sefam-medical.com</p> <p>SEFAM-Customer Service 10, allée Pelletier Doisy 54600 Villers-lès-Nancy France</p> <p>Tél : +33 383 44 85 00 Fax : +33 383 44 85 01</p> <p>Email : customerservice@sefam-medical.com</p> <p>M-294DFU00-60.4</p>	 <p>CE 2460  MADE IN TAIWAN</p> <p> Mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 30855 Langenhagen GERMANY</p> <p> HSINER Co. Ltd. No 312, Jongshan Rd. Shengang Dist. Taichung City 429</p>
--	---