

Használati útmutató - orvosi oxigénpalack nyomáscsökkentővel integrált szeleppel

Messer Medical
Home Care



1.



Az otthoni oxigénterápia eszközeinek használata előtt olvassa el figyelmesen a **Használati útmutatót!**

Fordítson külön figyelmet azokra az információkra, amelyeknél figyelmeztető jelzés látható!



2.



Oxigénben az anyagok hevesebben égnek, mint levegőben.

Ne dohányozzon, és ne engedjen senkit az oxigénpalack közelében dohányozni!

Nyílt láng közelében ne használja az oxigénpalackot!

3.



Az oxigénpalack csak **jól szellőző** helyiségben használható!

A palack használatakor a helyiségek közötti ajtókat tartsa nyitva!

4.



Ne helyezzen oxigénpalackot függöny mellé, és **ne takarja le** ruhával, mert ez gátolja a szellőzést!

Ne használja, ne szállítsa a palackot ruházat alatt, mert szivárgás esetén a ruha szövetében az oxigén feldúsulhat és külső gyújtó hatásra robbanásszerűen lángra kaphat!

5.



Tároláskor a palackokat fektetett vagy álló helyzetben kell rögzíteni, ezzel megelőzhető, hogy feldőljenek.

A palackot mindig álló helyzetben kell használni!

6.



Az oxigénpalackhoz és tartozékaihoz csak **tiszta, zsír- és olajmentes kézzel** lehet nyúlni!

Óvjuk a palackot, és az eszközöket a zsír- és olajszenyeződésektől!

7.



Az oxigénpalack és a tartozékok tisztítása tiszta, nedves ronggyal történhet. A tisztításhoz karcmentes tisztítószer használjon.

A palackot, az eszközöket tisztítás után alaposan meg kell szárítani.

8.



Mielőtt használatba venné a palackot, a nyomásmérő órán mindig ellenőrizze, elegendő oxigén áll-e még rendelkezésre.

Ha a mutató a piros mezőbe ér, haladéktalanul intézkedjen a palack cseréjéről!

Ne hagyja a palackot teljesen kiürülni!

9.



Az oxigénpalack használatához erősítse a tépőzáras párasító tartót a palack felső harmadára. Helyezze bele a párasító tartályt és csatlakoztassa csövét az áramlásszabályozó csomóhoz.

Az orrkanült, vagy az arcmaszkot erősítse fel a párasító tartályra. A műanyag hosszabbító cső legfeljebb 15 méter lehet.

OXIGÉNRENDELÉS: 06 80 200 442

Rendelésfelvétel:

Hétfőtől-csütörtökig 7.00-15.00 óra, pénteken 7.00-14.00 óra között

Ügyfélszolgálat: 06 1 435 1254

www.oxigenkezeles.hu

www.messer-medical.hu

Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci út 117.

Rendelésfelvétel a telephelyeken:

Budapest 06 1 435 1254 **Debrecen** 06 52 460 123

Győr 06 96 311 144 **Pécs** 06 72 312 505

Szolnok 06 56 422 144

Használati útmutató - orvosi oxigénpalack nyomáscsökkentővel integrált szeleppel

Messer Medical
Home Care



10.




Nyissa meg **lassan** a szelepet az óramutató járásával ellentétes irányba. Ellenőrizze, hogy az áramlás-szabályozó „nulla” állásban legyen!

11.



11.1

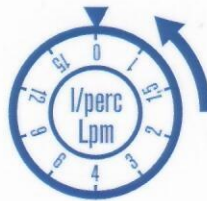

11.2

Állítsa be az orvos által előírt áramlási értéket (liter/perc) a 11.1 vagy 11.2 ábrán látható, 0-15-ig kalibrálható áramlásszabályozó óramutató járásával ellentétes (azaz jobbról balra) történő elforgatásával.

12.



Az oxigénáramlás ellenőrzéséhez helyezze a cső végét egy pohár vízbe. Ha nem képződnek buborékok, ellenőrizze az áramlás beállítását, a cső épségét, nincs-e esetleg szivárgás, eltömődés.

Ha az áramlást még most sem jelzik buborékok, forduljon Vevőszolgálatunkhoz!

13.



Használaton kívül a szelepet és az áramlásszabályozót el kell zárni.

A szelep elzárása, annak óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával történik (az ábrán felvázoltak alapján).

Az áramlásszabályozó elzárása, annak '0' állásba történő állításával történik.

Elzáráskor **ne feszítse túl** a gombot!

14.



Ha a palackon, a nyomás- vagy áramlásszabályozón bármilyen meghibásodást észlel, értesítse Vevőszolgálatunkat!

Ha meghibásodást észlel, **ne tegyen kísérletet a hiba kijavítására**, hacsak munkatársunk arra kifejezetten utasítást nem adott!

OXIGÉNRENDELÉS: 06 80 200 442

Rendelésfelvétel:

Hétfőtől-csütörtökig 7.00-15.00 óra, pénteken 7.00-14.00 óra között

Ügyfélszolgálat: 06 1 435 1254

www.oxigenkezeles.hu

www.messer-medical.hu

Messer Hungarogáz Kft., 1044 Budapest, Váci út 117.

Rendelésfelvétel a telephelyeken:

Budapest 06 1 435 1254 **Debrecen** 06 52 460 123

Győr 06 96 311 144 **Pécs** 06 72 312 505

Szolnok 06 56 422 144